

Afname-instructies voor detectie van HER-2-genamplificatie

Uitvoerfrequentie: 3 x per week.

Antwoordtijd: Maximum 3 werkdagen na ontvangst van het staal.
Stalen moeten ten laatste op maandag-, dinsdag- of donderdagnamiddag in het labo voor pathologie aanwezig zijn, om met de daaropvolgende run meegenomen te worden.

Afname materiaal: Biopsie, bij voorkeur chirurgische biopsie.

Afname-instructies: Biopsie na afname zo snel mogelijk fixeren.
Fixeren in 4% gebufferde formaldehyde.
Fixatietijd optimaal tussen 6 en 48 uren

Specifiek voor externe stalen: [Aanvraagformulier](#) of begeleidende brief met volgende gegevens:

- patiëntidentificatie,
- mutualiteitsgegevens,
- staalidentificatie (nummer staal en paraffineblok),
- staaltype en lokalisatie,
- type fixatief, en
- indien beschikbaar, fixatieduur:
 - ongekend,
 - tussen 6 en 48 uren,
 - minder dan 6 uren, of
 - meer dan 48 uren.

Paraffineblok.

Coupe immunohistochemische kleuring voor HER2.

Anatomopathologisch verslag.

Verzendadres: Laboratorium voor Pathologie
AZ Delta
Deltalaan 1
8800 Roeselare
Tel.: 051/23 77 32
Fax: 051/23 79 40

Exclusiecriteria: Stalen met onvoldoende invasief carcinoom.

Interferentie: - Weefsels gefixeerd in andere fixatieven dan formaldehyde of ontkalkte weefsels kunnen suboptimale resultaten geven. Indien het resultaat negatief is wordt dit gerapporteerd onder voorbehoud.