

Afname-instructies voor detectie van HER-2-genamplificatie

<u>Uitvoerfrequentie:</u>	Wekelijks op woensdag.
<u>Antwoordtijd:</u>	Maximum 3 weken na ontvangst van het staal. Stalen moeten ten laatste op maandagavond in het Laboratorium voor Pathologie aanwezig zijn om met de run van de daaropvolgende woensdag meegenomen te worden.
<u>Afname materiaal:</u>	Biopsie, bij voorkeur chirurgische biopsie.
<u>Afname-instructies:</u>	Biopsie na afname zo snel mogelijk fixeren. Fixeren in 4% gebufferde formaldehyde. Fixatietijd tussen 6 en 48 uren.

Specifiek voor externe stalen: [Aanvraagformulier](#) of begeleidende brief met volgende gegevens:

- patiëntidentificatie,
- mutualiteitsgegevens,
- staalidentificatie (nummer staal en paraffineblok),
- staaltype en localisatie,
- type fixatief, en
- indien beschikbaar, fixatieduur:
 - ongekend,
 - tussen 6 en 48 uren,
 - minder dan 6 uren, of
 - meer dan 48 uren.

Paraffineblok.

Coupe immuunhistochemische kleuring voor HER2.

Anatomopathologisch verslag.

Verzendadres: Laboratorium voor Pathologie
 AZ Delta
 Deltalaan 1
 8800 Roeselare
 Tel.: 051/23 77 32
 Fax: 051/23 79 40

<u>Exclusiecriteria:</u>	Stalen met onvoldoende invasief carcinoom.
<u>Interferentie:</u>	- Weefsels gefixeerd in andere fixatieven dan formaldehyde of ontkalkte weefsels kunnen suboptimale resultaten geven. Indien het resultaat negatief is wordt dit gerapporteerd onder voorbehoud. - Indien de fixatieduur minder dan 6 uren of meer dan 48 uren bedraagt, wordt dit bij een negatief resultaat vermeld in het rapport.